



Herbruikbare gezichtsbescherming – veiligheid en comfort, de hele dag lang

Dit beschermontwerp werd ontwikkeld in samenwerking met intensive care en infectologiespecialisten*

Gezichtsbescherming

De primaire functie is om het gezicht te beschermen tegen direct contact van vloeistoffen en aerosolen. Een secundaire functie is het beperken van de toegang tot het gezicht door directe aanraking door mogelijk besmette handen.

ONTSMETTEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK!

Montage-instructies aan de andere kant van de pagina.

Inhoud van het pakket

1 x beschermframe	1 x verstelbare bovenband
1 x dempingsstrip voor het beschermframe	3 x doorzichtige schermen
1 x verstelbare zijband	1 x gebruikershandleiding met montage-instructies

Manufacturer and distributor

3D Technology LTD
Registratie nummer 42103085103
71 Gustava Zemgala street, Riga, LV-1039, Letland (Latvija)

Opslag

Unopened package can be stored for 24 months

Productiemaand

05.2020

CE-markering



Belangrijke opmerkingen

Alle onderdelen zijn gemaakt van materialen die wasbaar en ontsmetbaar zijn.

Het beschermmasker bestaat uit modulaire componenten, waarbij ieder component kan worden vervangen en het verder gebruik van het gezichtsmasker mogelijk blijft. Contact info@shield48.eu voor vragen i.v.m. vervangonderdelen.

Het gezichtsmasker bevat geen metalen onderdelen en geen stoffen componenten.

De set omvat 3 transparante schermen. Elk scherm zou minimaal 10 dagen worden gebruikt zorg en gereinigd (minimaal in totaal 30 dagen).

Elk scherm heeft een beschermfolie aan beide zijden die krassen voorkomt tijdens de levering - deze voor gebruik verwijderen!

Elk scherm mag maar door één persoon worden gedragen. Een scherm is niet bedoeld voor meerdere personen en de pasvorm mag niet meerdere keren worden versteld, want dit kan de bevestigingsgaten op de banden doen verslijten.

Gevaarpreventie

Bescherming tegen spatten van gevaarlijke materialen - vloeistoffen, aerosolen en vuil naar het gezicht geprojecteerd

Veiligheidsvoorzieningen

- Beschermt het hele gezicht - tot aan de oren aan beide kanten van het gezicht
- Beschermt gezicht van bovenaan, in het bijzonder belangrijk voor zorgverleners die voorover leunen om voor een patiënt te zorgen.
- Gemakkelijk te verwijderen in geval van ongevallen
- Impactwerend - scherm zal niet breken bij vallen of buigen.
- Beperkt toegang tot het gezicht door directe aanraking van mogelijk besmette handen
- Mogelijkheid om te dragen boven bril, beschermbril, chirurgische maskers en ademhalingstoestellen
- Kan gedragen worden met mutsen, beschermkappen en de meeste helmen

Materialen

Frame ABS (Acrylonitril-butadiëen-styreen)
Banden PET en PVC (polyethyleentereftalaat en polyvinylchloride)
Scherm PET (varianties omvatten PET, PET-A, PET-G)
Demping Inert rubber of siliconen

Schermdikte

0,45 tot 0,75 mm (alle diktes hebben dezelfde functionaliteit zonder enige visuele vervorming - afhankelijk van materiaalbeschikbaarheid)

Herbruikbaar

Ja – bedoeld voor 1 persoon; herbruikbaar indien schoongemaakt en gedesinfecteerd

Desinfecteerbaar

Ja – alle onderdelen kunnen effectief worden gereinigd/gewassen en gedesinfecteerd

Hoofdband

Ja – over de bovenkant en rond het hoofd

Verstelbare pasvorm

Ja (alle hoofdmaten)

Vloeistofbestendig

Ja – kan volledig worden ondergedompeld in ontsmettingsmiddel en/of water

Afmetingen

H 240 x B 160 x D 136 mm (gemonteerd)
H 240 x B 362 mm (niet-gemonteerd scherm en verpakkingsgrootte)

NETTO gewicht

Afhankelijk van de schermdikte 78 tot 105 gram

* Elke ontwerpbeslissing werd overlegd met het team van Infectious Diseases en Hospital Epidemiology Advisory Service van Paul Stradins Clinical University Hospital onder leiding van Prof. Uga Dumpis, Riga (Letland)

Handleiding

LET OP ⚠

- HET IS VERPLICHT HET SCHERM TE DESINFECTEREN VOOR HET EERSTE GEBRUIK!
- GEBRUIK HET SCHERM NIET ALS JE NIET ZEKER BENT DAT HET SCHOON EN GEDESINFECTEERD IS!
- GEBRUIK HET SCHERM NIET ALS EEN VAN DE ONDERDELEN BESCHADIGD IS!

Schoonmaken

Reinig vóór elk gebruik het scherm en alle onderdelen met een geschikte ontmettingsoplossing en was het in een warm sopje.

EU-gereguleerde ontmettingsmiddelen, verdunde bleekoplossingen voor huishoudelijk gebruik of ten minste 70% alcoholoplossing zijn geschikt. Lees meer over Algemene aanbevelingen voor routinematige reiniging en ontmetting tijdens COVID-19 hier <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html>

Het scherm moet niet gedemonteerd worden om te worden gedesinfecteerd en gereinigd.

Gebruik geen schuursponzen/materialen om het schild te reinigen.

Het doorzichtig scherm moet worden vervangen als het mogelijk besmet, beschadigd is en/of als het zichtvermogen is verdwenen.

Gebruik van het scherm

Het scherm is ontworpen om meerdere keren door één persoon te worden gedragen

De pasvorm mag niet meerdere keren worden aangepast, want de bevestigingsgaten op de riemen kunnen verslijten

Door de volgende schoonmaakinstructies te volgen, moet elk transparant scherm minimaal 10 dagen kunnen gebruikt worden.

Gezichtsmasker moet worden gebruikt in omstandigheden waarin het niet mogelijk is om sociale afstand te bieden aan mogelijk zieke mensen, zoals medisch personeel dat voor patiënten zorgt, winkelpersoneel, enz.

Montage-instructies

Het gezichtsmasker wordt gedemonteerd geleverd, elke gebruiker moet het zelf monteren (duurt 1-2 min.)

Zorg ervoor dat je handen schoon zijn voor de montage van het scherm!


Zorg ervoor dat je het scherm met zorg behandelt en desinfecteert, om te voorkomen dat de verpakking wordt besmet

Volg de montage-instructies via de stappen 1 tot 10. Pas, indien nodig, de maat van de banden aan.


Scherm kan worden gebruikt zonder de dempingsstrip en de bovenste band - test de pasvorm die voor jou past!

Montage


- 1** Verwijder de beschermfolie van de dempingsstrip

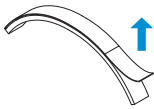

- 2** Kleef het aan de binnenkant van het frame

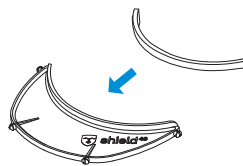


- 3** Steek de bovenste band door de sleuf in het frame

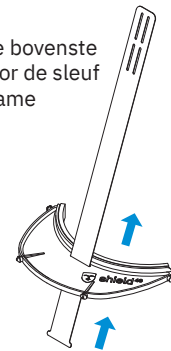

- 4** Beide uiteinden van de zijband moeten naar boven wijzen met de bocht eronder




- 5** Bevestig de zijband aan één kant van de randpenen van het beschermmasker

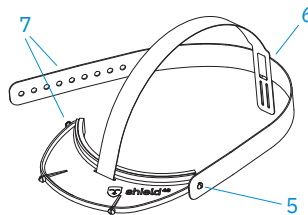


- 6** Rijk de zijband door de sleuf aan het andere uiteinde van de bovenste band. Pas het - kies, afhankelijk van de hoofd grootte de bovenste of onderste positie

- 7** Verstel de pasvorm van het hoofd door een van de verstelgaten op de zijband te kiezen.

- 8** Verwijder de beschermfolie aan de beide zijden van het transparant scherm

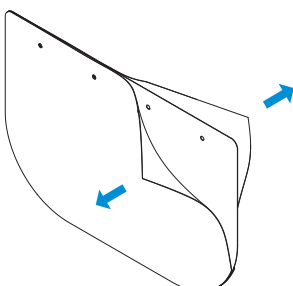

- 9** Bevestig het transparant scherm aan de framepenen

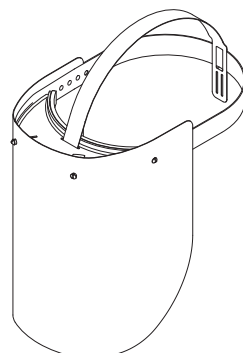

- 10** Verstel, indien nodig de pasvorm opnieuw aan, door een ander bevestigingsgat te kiezen (stap 7) of als het scherm te laag of te hoog op het hoofd staat, kies een andere sleuf op de bovenste band (stap 6)



www.shield48.eu/manual