

Многоразовый защитный щиток для лица — безопасность и комфорт в течение всего дня



Проект защитного щитка был разработан совместно с отделением интенсивной терапии и специалистами по инфектологии*

Защитный щиток для лица

Основная функция заключается в защите лица от прямого контакта с жидкостями и аэрозолями. Вторичная функция - ограничить доступ к лицу от прямого прикосновения, возможно, загрязнённых рук.

ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Инструкция по сборке на обороте.

Содержимое упаковки

1 × защитная рамка	1 × регулируемая верхняя ляжка
1 × прокладка для защитной рамки	3 × прозрачных экрана
1 × регулируемая боковая ляжка	1 × руководство с инструкцией по сборке

Производитель и дистрибьютор

3D Technology LTD
Регистрационный № 42103085103
улица 71 Gustava Zemgala, Riga (Рига), LV-1039, Latvia (Латвия)

Хранение

Закрытая упаковка может храниться 12 месяцев

Изготовления

05.2020

Сертификация



Безопасность защитного щитка

Защита лица от опасных веществ в форме брызг жидкостей, аэрозолей и грязи, попадающие в лицо.

Особенности защитного щитка

- Экран полностью закрывает лицо – до ушей с обеих сторон лица
- Защищает лицо сверху, особенно важно для медработников, которые наклоняются для ухода за пациентами
- Легко снимается в случае несчастных случаев
- Ударопрочный экран не треснет при падении или изгибе
- Ограничивает доступ к лицу от прямого контакта, возможно, загрязнённых рук
- Возможность надевать поверх защитных очков, хирургических масок и респираторов
- Возможность надевать с шапками, защитными капюшонами и большинством шлемов

Материалы

Рамка	АБС-пластик (акрилонитрил бутадиен стирол)
Лямки	ПЭТ и ПВХ (полиэтиленгликольтерефталат и поливинилхлорид)
Экран	ПЭТ (разновидности как PET, PET-A, PET-G) Прокладка инертная резина или силикон

Толщина экрана

От 0.45 до 0.75 мм (все толщины имеют одинаковую функциональность без каких-либо визуальных искажений – в зависимости от наличия материала)

Многоразовый

Да, предназначен для 1 человека; многоразовый, если он очищен и продезинфицирован

Дезинфицирование

Да, все детали могут быть эффективно очищены / промыты и продезинфицированы

Лямка на голову

Да, над головой и вокруг головы

Регулируемая посадка

Да (для всех размеров головы)

Водоустойчивость

Да, может быть полностью погружен в воду или дезинфицирующее средство

Размеры

В 240 × Ш 160 × Д 136 мм (в сборке)

Нетто вес

В зависимости от толщины экрана: от 78 до 105 грамм.

www.shield48.eu info@shield48.eu

Важные заметки

Все компоненты изготовлены из моющихся и дезинфицируемых материалов

Щиток для лица состоит из модульных компонентов, где каждый из компонентов может быть заменен и позволяет продолжать использовать щиток для лица. Свяжитесь с info@shield48.eu, чтобы узнать о замене компонентов.

Щиток для лица не имеет металлических частей и тканевых компонентов.

В комплект входят 3 прозрачных экрана. Каждый экран должен служить не менее 10 дней при тщательном уходе и чистке (всего: не менее 30 дней).

Каждый экран имеет защитную пленку с обеих сторон, чтобы экран не был поцарапан во время перевозки – снимите защитную пленку!

Каждый щиток для лица может носить один человек. Один щиток предназначен только для одного человека, посадку защитного экрана не стоит регулировать много раз, так как это может привести к износу крепежных отверстий в ляжках.

* Каждое проектное решение было согласовано с группой консультантов по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии больницы клинического университета им. Паула Страдыня, возглавляемой проф. Уга Думпис, Рига Латвия (Uga Dumpis, Riga Latvia)

Инструкция пользователя

ВНИМАНИЕ ⚠

- ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ЩИТОК ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЩИТОК ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕННЫ ЧТО ОН ЧИСТ И ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАН!
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЩИТОК ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЕГО ЧАСТЬ ПОВРЕЖДЕНА!

Чистка

Перед каждым использованием очистите экран и все детали при помощи соответствующего дезинфицирующего раствора и промойте в мыльной воде.

Подходящие бытовые дезинфицирующие средства, регулируемые ЕС, разбавленные бытовые отбеливающие растворы или по меньшей мере 70% спиртовые растворы, подходят. Узнайте больше об общих рекомендациях по очистке и дезинфекции во время COVID-19 тут: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html>

Для очистки и дезинфекции экран можно не разбирать

Не используйте абразивные губки/материалы для очистки экрана.

Прозрачный экран должен быть заменен, если он загрязнен, поврежден и/или он потерял видимую способность.

Использование защитного щитка

Щиток предназначен для многократного использования одним человеком

Посадку защитного экрана не стоит регулировать много раз, так как это может привести к износу крепежных отверстий в лямках

Следуя инструкциям по очистке, использование каждого прозрачного экрана должно длиться не менее 10 дней

Щиток для лица следует использовать в условиях, когда невозможно обеспечить социальную дистанцию от потенциально болеющих людей. Отлично подойдет медицинскому персоналу, присматривающему за пациентами, работникам розничной торговли и т.д.

Инструкция по сборке

Щиток для лица доставляется в разобранном виде, каждый пользователь должен самостоятельно собрать (занимает 1-2 мин)

Убедитесь, что руки чисты перед сборкой защитного щитка!

Для избежания возможности загрязнения щитка с упаковки соблюдайте осторожность дезинфицируете защитный экран

Следуйте инструкциям по сборке выполнив шаги с 1 по 10. При необходимости отрегулируйте лямки


Щиток можно использовать без мягкой прокладки!

Сборка


1 Снимите защитную пленку с прокладки



2 Приклейте ее к внутренней стороне рамки

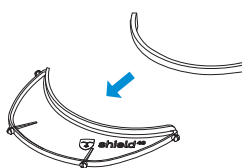


3 Проденьте верхнюю лямку через прорезь в рамке

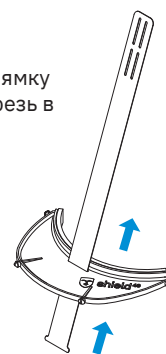

4 Оба конца боковой лямки должны быть направлены изгибов вверх, как показано ниже




5 Прикрепите боковую лямку к штифту с одной стороны рамки

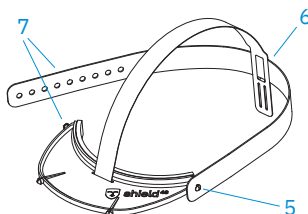


6 Проденьте боковую лямку через прорезь в верхней лямке. **Примерьте, в зависимости от размера головы, выберите верхнюю или нижнюю прорезь**

7 Отрегулируйте посадку на голове, выбрав одно из регулировочных отверстий на боковой лямке

8 Снимите защитную пленку с обеих сторон экрана

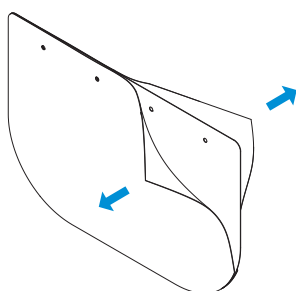

9 Прикрепите прозрачный экран к рамке по отверстиям

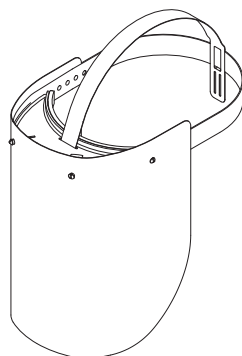

10 Повторно отрегулируйте посадку по мере необходимости, выбрав другое отверстие для крепления (шаг. 7) или если щиток сидит слишком высоко или низко на голове, выберите другую прорезь на верхней лямке (шаг. 6)



www.shield48.eu/manual